

Инструкция по настройке лампы палатной сигнализации

Порядок сохранения кнопок вызова в памяти лампы палатной сигнализации

1. Откройте лампу. Внутри находится 3 кнопки “R” “H” “G”.
Включите питание.
2. Нажмите и удерживайте кнопку (R). Услышите тройной звук «пи-пи-пи». Нажмите кнопку вызова, одновременно услышите длительный звук «пи», подтверждающий успешное сохранение. Нажимайте по порядку все остальные кнопки вызова. Отпустите кнопку (R).
3. Каждая из кнопок “R” “H” “G” может хранить до 30 кнопок вызова. Всего возможно хранить 90 кнопок вызовов.
4. После сохранения при повторном нажатии кнопки (R) произойдет стирание ранее введенных кнопок.
5. Аналогично сохраните кнопки вызова для кнопок “H” “G”.

При использовании кнопок Y-V3 лампа имеет возможность подсветки красным или зеленым светом.

Для выключения сигнализации лампы нажать на кнопке вызова Y-V3 кнопку сброс.